


Разрешено к применению


Минздравом СССР 16 июля 1987 г.

# ИПЛИКАТОР

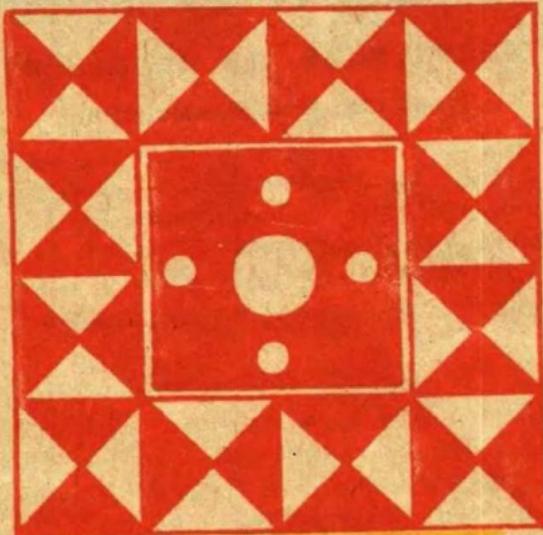

# КУЗНЕЦОВА

# имплантатор КУЗНЕЦОВА

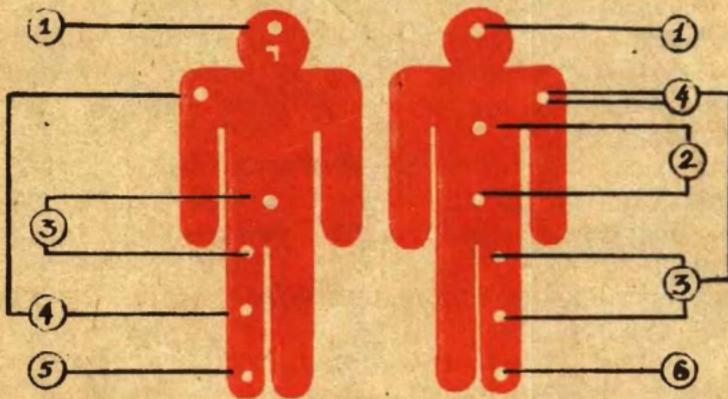

## снимает:

- |  |     |
|--|-----|
| Головные боли различной локализации            | — 1 |
| Боли в позвоночнике (остеохондроз)             | — 2 |
| Боли в мышцах (миозиты, нейромиозиты, миалгии) | — 3 |
| Боли в суставах (артриты, артрозы, бурситы)    | — 4 |
| Воспаление надкостницы (периоститы)            | — 5 |
| Уплощение свода стопы                          | — 6 |

Министерство здравоохранения СССР  
Управление по внедрению  
новых лекарственных средств и  
медицинской техники  
**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник управления по внедрению  
новых лекарственных средств  
и медицинской техники МЗ СССР

**Ю. Г. БОБКОВ.**

16 июля 1987 г.

## **„ИПЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА“**

### **Инструкция по применению**

#### **Показания к применению**

«Ипликатор Кузнецова» — индивидуального пользования, предназначен для снятия болей в мышцах, суставах и позвоночнике, для нормализации деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др., а также для восстановления и повышения работоспособности.

#### **Способ применения**

Ипликатор накладывают на болевую область. Затем на него надавливают руками (в пределах болевой переносимости) в течение 40—60 сек., после чего ипликатор снимают.

Процедура ипликации повторяется до полного исчезновения болей.

Для достижения более выраженного эффекта во время ипликации необходимо выполнять активные движения, вызывающие сокращение и расслабление мышц в болевой области.

Ипликаторы можно носить длительное время на болевой области, прижимая их эластичным бинтом, поясом, полотенцем и т.п.

В целях нормализации деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и др. рекомендуется проводить ипликацию продолжительное время, воздействуя на поверхность всего тулowiща (грудь, спину, живот), обеспечивая плотное прижатие ипликатора.

Для восстановления и повышения работоспособности необходимо накладывать ипликатор на возможно большую поверхность тела, включая конечности.

Время проведения ипликации и количество процедур не ограничено.

Для снятия болей в мышцах, суставах и позвоночнике и при повышенной болевой чувствительности рекомендуется использовать пластмассовые ипликаторы с шагом 2, 4, 6, 8, мм и ипликаторы с металлической иглой с шагом 2,4 мм. Для других целей (лежание на ипликаторах, ношение костюма из ипликаторов) используются ипликаторы с шагом 6, 8 мм.

### Дезинфекция

Осуществляется посредством обработки ипликаторов в растворах моющих средств типа «Биолот», «Лотос» или мыльной воде с помощью мягкой щетки с последующим промыванием в пропарочной воде.

### Форма выпуска, комплектность и упаковка

Ипликаторы изготавливаются двух типов:

1) прямоугольной, круглой и квадратной формы с пластмассовыми иглами с шагом между ними 2, 4, 6, 8 мм, закрепленными на полиэтиленовой пленочной или тканевой основе, или россыпью (для самостоятельного закрепления кнопками с помощью кондуктора или пришиванием);

2) с металлическими иглами с шагом между ними 2, 4, 8 мм. Ипликаторы упаковываются в полиэтиленовые пакеты или футляры.

#### **Условия применения и хранения**

Хранить в пакете или футляре при температуре от 10 до 35°C. Ипликаторы с металлической иглой (тип 2) хранить в сухом месте.

Не допускаются удары и сильные механические воздействия.

#### **Противопоказания**

Те же, что при лечебном массаже.

#### **Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие ипликатора требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий применения и хранения в течение 6 месяцев.



«Ипликаторы Кузнецова»  
защищены авторскими  
свидетельствами СССР