

Руководство по применению Светильник диагностический галогеновый передвижной, тип Masterlight

Уважаемые клиенты,

большое спасибо, что Вы приняли решение в пользу изделия фирмы KaWe. Наша продукция известна своим высоким качеством и долговечностью. Настоящее изделие фирмы KaWe соответствует определениям директивы EG 93/42/EWG (директива по медицинским приборам) и EN 1045.



Перед использованием следует полностью и внимательно прочитать настоящее руководство по обслуживанию и соблюдать указания по уходу!

Обозначение: Светильник диагностический галогеновый передвижной

Назначение: прибор для дополнительного освещения рабочего поля

Применение: Использовать светильник разрешается только специально обученному и допущенному персоналу.

Целевое назначение: используется для кабинетов ЛОР-врачей, офтальмологов, гинекологов, врачей общей практики. Также как дополнительный источник света при малоинвазивных операциях

Обработка / стерилизация: Светильник можно обрабатывать обычными средствами предназначенными для обработки. Колеса нужно регулярно проверять, очищать от застрявшего мусора

Риск / Указания возможных источников возникновения опасности:

Использовать только на ровной поверхности. Перед перемещением важно проверить, что тормоза на колесах разблокированы.

Технические характеристики:

Максимальная высота 220 см

Гибкое плечо 82 см

Диаметр основания штатива 60см

Вес 4,4кг

230 Volt, 12V/35Watt

Мощность светового пучка 44 000 Люкса.

Диаметр рабочего поля на расстоянии 50 см – 90 мм, 1 м – 180 мм, 2 м – 360 мм.

Лампа в защитном колпаке

Световая температура 3200 К

Два тормоза на колесах

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства действуют в течение 12 месяцев с момента продажи изделия

Условия гарантии

1. Гарантия действительна только при наличии гарантийного талона с указанием модели изделия, даты продажи.

2. Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в гарантийном талоне.

3. Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

❖ Механические повреждения

❖ Ремонт был произведен не в мастерской Поставщика.

❖ Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ жидкостей и т.д.

❖ Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запчастей.

❖ Повреждения, вызванные нарушением «Руководства пользователя»

Кат.№	Зап.части:
29250	Галогеновый медицинский светильник, тип Мастерлайт, 12V/35W, на стальном штативе с пятью колесами
29252	Сменная Галогеновая лампа 12V/35W
29260	Гибкий штатив, фиксирующийся в заданном положении, с головкой осветителя
29261	Настенное крепление
29263	Настольное крепление

Состав:

(1) 5 ножек с колесиками

(2) 1 шестигранный болт M10+ шайба прокладки

(3) 5 шестигранных болтов M6

(4) 1 штатив с пластиковой крестовиной

(5) Монтажная пластина для верхней части

(6) 4 винта с внутренним шестигранником M4x15

(7) 1 верхняя часть с гибким штативом



(8) Ключ размером 3 для винтов для винтов с внутренним шестигранником

(9) Пластиковый ключ

Эти запчасти нужны для монтировки

Инструкция

Выньте все части из картонной коробки. Шестигранные болты M10 и шайбы (2) и 5 шестигранных болтов M6(3) выкрутить из штатива с пластмассовой крестовиной (3). Пять ног с колесиками (1) воткнуть на крестовину (4) так чтобы отверстие просверленные на трубках были направлены вниз и закрепить шестигранными болтами M6 (3). Между колесами с тормозами находятся фиксирующие колеса. Рис.3. Ноги с колесиками (1) прикручиваются пластиковым ключом (9) сверху на крестовину шестигранным болтом M10 (2) к штативу с пластиковой крестовиной (4). Выкрутить винты (6) из монтажной панели (5). Верхнюю часть (7) соединить с панелью (5), закрутить винтами (6) с помощью ключа(8)

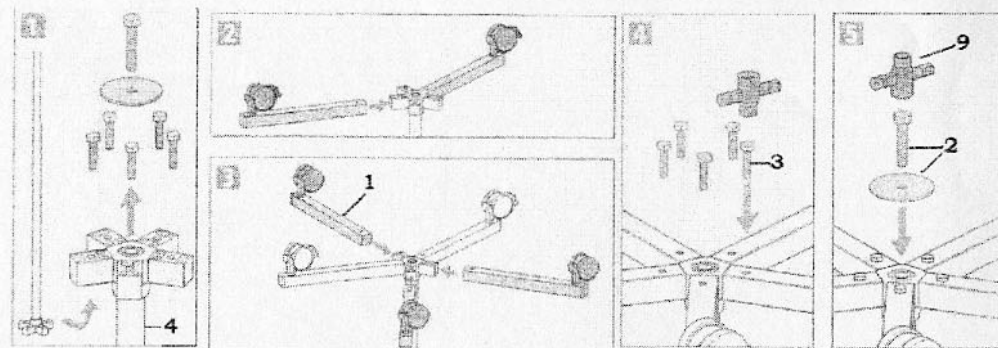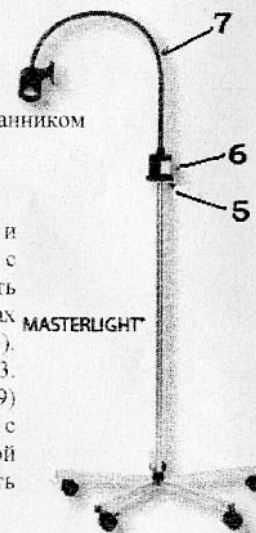

Модель

Дата продажи

Продавец